




达盛医疗，
力量源于勇气，达于行动...


用户使用手册

VER.DCM.UM.CN2026.04






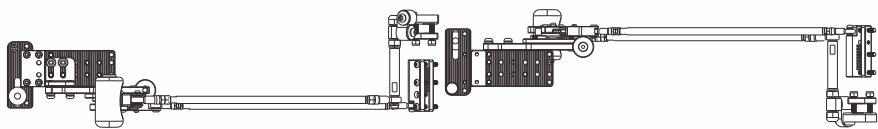

H.C.D, 新款, 障碍人士汽车辅助驾驶装置
将于2026年为您提供产品服务...

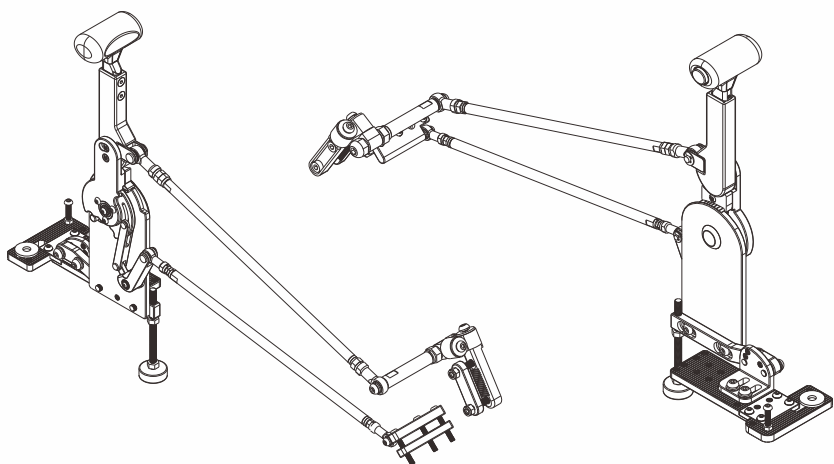

H.C.D, Handle Control Driving Device
on the way, be coming soon, in 2026...

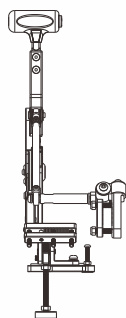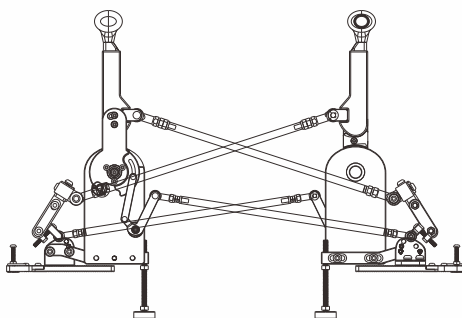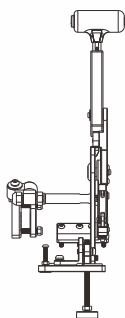

1. 特别注意事项	P2
1.1 产品售后服务必读事项	P2
1.2 特别关注事项	P2
2. 产品信息及售后服务	P3
2.1 产品售后服务信息卡	P3
2.2 有关图标符号说明	P3
2.3 生产销售服务信息	P3
3. DCM-AC05、AC06、AC07(W)、AC09系列充气防压疮垫	P4
3.1 产品说明	P4
3.2 产品型号与尺寸	P5
3.3 充气操作及修补指导	P7
3.4 各型号最大承重参照表	P8
3.5 使用注意事项	P8
4. DCM-WBC系列轮椅靠背垫	P9
4.1 产品结构及特点	P9
4.2 产品尺寸表	P9
4.3 产品安装指南	P10
4.4 使用注意事项	P11
5. DCM-GW系列凝胶轮椅坐垫	P12
5.1 产品说明	P12
5.2 产品特点及尺寸	P12
5.3 使用注意事项	P12
6. 凝胶坐便垫、充气坐便垫	P13
6.1 产品说明	P13
6.2 使用注意事项	P13
7. DCM-PS26辅助取物杆	P14
7.1 产品说明	P14
7.2 使用注意事项	P14
8. 压疮预防知识	P15

❗ 执行 使用前，请仔细、认真地阅读完此手册。

❗ 执行 请妥善保管好此手册，直到不再使用并另行处理或一并退回所购产品为止。

⚠ 敬告 鉴于用户手册篇幅的局限性，实物与用户手册上内容可能不一致，请以实物及产品标识内容为准。

1.1 产品售后服务必读事项


- 使用之前，请认真阅读此手册后，再进一步操作或使用本产品及服务。
- 必要时，本手册可以以电子版本格式提供给用户。
- 请妥善保管好随附本产品的《产品售后服务信息卡》，此卡是提供一切售后服务的条件。
- 当开箱后，发现没有产品随附的《产品售后服务信息卡》时，请停止继续操作或使用本产品，并及时与商家或厂家取得联系。
- 请充分理解并遵守“特别注意事项”中提及的内容，并认真执行特别注意事项。如有疑问，请与商家或厂家取得联系，获得充分说明并完全理解后，再行操作或使用本产品。
- 本手册中提及的“压疮预防知识”将更好地帮助您预防压疮的形成，避免对您及家人带来身体上和精神上的痛苦。在使用相关产品时，请认真阅读和充分理解此项内容。
- 有遇更多使用问题时，请联系客服电话：0574-67051416。

1.2 特别关注事项：

-  **警告** 表示“极有可能造成人身伤害或重伤的操作”。
-  **危险** 表示“极有可能造成人身伤亡的操作”。
-  **注意** 表示“极有可能造成产品受损的操作”。
-  **禁止** 表示禁止的操作。
-  **执行** 表示必须要遵守的操作。

-  **执行** 使用前，请仔细、认真地阅读完此手册。
-  **执行** 请妥善保管好此手册，直到不再使用并另行处理或一并退回所购产品为止。
-  **敬告** 鉴于用户手册篇幅的局限性，实物与用户手册上内容可能不一致，请以实物及产品标识内容为准。

2.1 产品售后服务信息卡

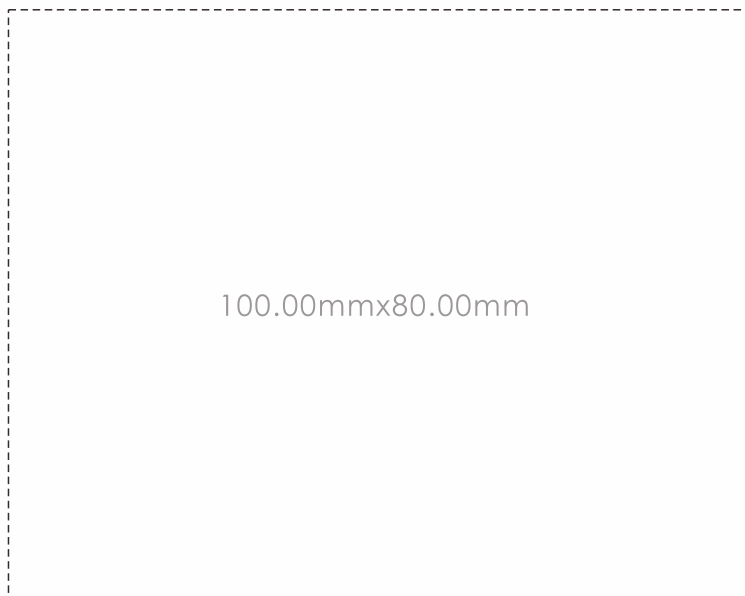

2.2 有关图标符号说明：



表示产品型号。



产品已在欧盟相关机构认证注册，允许在欧盟地区销售。



表示产品生产批号。



表示产品可以使用截止日期。



表示产品生产日期。



务必查阅并保管好使用说明。



产品制造、销售商信息。



如包装被割破或刺破，请勿使用。

2.3 生产销售服务信息：

由 宁波达盛医疗器械有限公司 监制销售

地址：浙江省宁波市宁海县跃龙街道檀香南路12幢1号

电话：0574-67051416

网址：www.dachengmed.com

邮箱：info@dachengmed.com

厂商：宁达盛医疗器械有限公司

产地：浙江省宁波市宁海县跃龙街道檀香南路12幢1号

3.1 产品说明



DCM-AC05系列充气防压疮垫



DCM-AC06系列充气防压疮垫



DCM-AC07(W)系列充气防压疮垫



DCM-AC09系列充气防压疮垫

DCM-AC05、DCM-AC06、DCM-AC07(W)、DCM-AC09系列充气防压疮垫适用于中、低危截瘫患者臀部受压区的褥疮预防。坐垫通过气道，向相互连通的气囊注入适量空气后，根据人体臀部自然轮廓需求，调节储气量，减轻坐骨、尾骨区域肌肉及血管所受到的压力，使血液充分循环，最大限度地降低和减少剪切力和摩擦力，从而有效预防肌肉组织压疮损伤的发生。

DCM-AC07W系列充气防压疮垫，以7cm高气囊为主，再组合6、9cm高度的气囊制成波浪形充气防压疮垫，使之与臀部轮廓更好贴合，让截瘫患者在长时间的坐姿过程中得到最佳的减压效果及舒适平衡度。

DCM-AC05、AC06、AC07(W)、AC09系列充气防压疮垫选用环保PVC原料。PVC气囊顶部四面凹槽式设计，可以更好地将人体热量通过透气坐垫套快速排出，减少热量的积聚。





- ④ 魔术贴(毛面) ⑤ 涤纶提手 ⑥ 涤纶固定带(与轮椅两侧推杆)
- ① 涤纶透气面料 ② 涤纶三明治透气网布 ③ PVC涤纶复合防滑革


3. DCM-AC05、AC06、AC07(W)、AC09系列充气防压疮垫

3.2 产品型号与尺寸

DCM-AC05 系列	DCM-AC06 系列	DCM-AC07(W) 系列	DCM-AC09 系列
DCM-AC05-1V2525	DCM-AC06-1V2525	DCM-AC07(W)-1V2525	DCM-AC09-1V2525
DCM-AC05-1V2530	DCM-AC06-1V2530	DCM-AC07(W)-1V2530	DCM-AC09-1V2530
DCM-AC05-1V3030	DCM-AC06-1V3030	DCM-AC07(W)-1V3030	DCM-AC09-1V3030
DCM-AC05-1V3035	DCM-AC06-1V3035	DCM-AC07(W)-1V3035	DCM-AC09-1V3035
DCM-AC05-1V3535	DCM-AC06-1V3535	DCM-AC07(W)-1V3535	DCM-AC09-1V3535
DCM-AC05-1V3540	DCM-AC06-1V3540	DCM-AC07(W)-1V3540	DCM-AC09-1V3540
DCM-AC05-1V4040	DCM-AC06-1V4040	DCM-AC07(W)-1V4040	DCM-AC09-1V4040
DCM-AC05-1V4540	DCM-AC06-1V4540	DCM-AC07(W)-1V4540	DCM-AC09-1V4540
DCM-AC05-1V4545	DCM-AC06-1V4545	DCM-AC07(W)-1V4545	DCM-AC09-1V4545
DCM-AC05-1V5045	DCM-AC06-1V5045	DCM-AC07(W)-1V5045	DCM-AC09-1V5045
DCM-AC05-1V5050	DCM-AC06-1V5050	DCM-AC07(W)-1V5050	DCM-AC09-1V5050

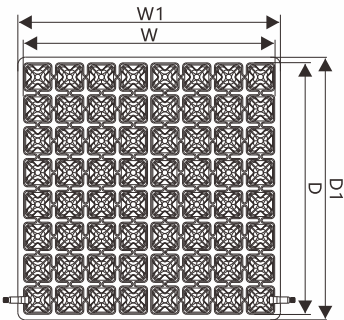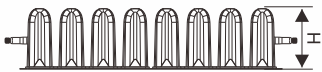

① DCM-AC07W-1V4040
波浪型充气防压疮垫

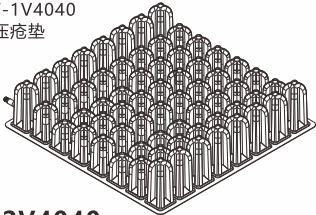

DCM-AC09-2V4040

① ② ③

AC05: 约5.50cm 坐垫高 (充气之后)
AC06: 约5.50cm 坐垫高 (充气之后)
AC07: 约6.50cm 坐垫高 (充气之后)
AC08: 约8.50cm 坐垫高 (充气之后)

①

②

1V: 单气嘴
2V: 双气嘴
L2V: L型双气嘴

③

坐垫宽: 约40cm
坐垫深: 约40cm

DCM-AC05、AC06、AC07(W)、AC09系列充气防压疮垫型号及尺寸参数						
坐垫型号	坐垫参数	坐垫高(H)	坐垫宽(W)	坐垫深(D)	坐垫宽(W1)	坐垫深(D1)
DCM-ACXX-1V2525		5.50/6.00/7.00/9.00cm	25.00cm	25.00cm	26.00cm	26.00cm
DCM-ACXX-1V2530		5.50/6.00/7.00/9.00cm	25.00cm	30.00cm	26.00cm	31.00cm
DCM-ACXX-1V3030		5.50/6.00/7.00/9.00cm	30.00cm	30.00cm	31.00cm	31.00cm
DCM-ACXX-1V3035		5.50/6.00/7.00/9.00cm	30.00cm	35.00cm	31.00cm	36.00cm
DCM-ACXX-1V3535		5.50/6.00/7.00/9.00cm	35.00cm	35.00cm	36.00cm	36.00cm
DCM-ACXX-1V3540		5.50/6.00/7.00/9.00cm	35.00cm	40.00cm	36.00cm	41.00cm
DCM-ACXX-1V4040		5.50/6.00/7.00/9.00cm	40.00cm	40.00cm	41.00cm	41.00cm
DCM-ACXX-1V4540		5.50/6.00/7.00/9.00cm	45.00cm	40.00cm	46.00cm	41.00cm
DCM-ACXX-1V4545		5.50/6.00/7.00/9.00cm	45.00cm	45.00cm	46.00cm	46.00cm
DCM-ACXX-1V5045		5.50/6.00/7.00/9.00cm	50.00cm	45.00cm	51.00cm	46.00cm
DCM-ACXX-1V5050		5.50/6.00/7.00/9.00cm	50.00cm	50.00cm	51.00cm	51.00cm

*实际尺寸与测量参数略有出入；以上测量参数不包括配送坐垫套尺寸；XX=AC05或AC06或AC07(W)或AC09

3. DCM-AC05、AC06、AC07(W)、AC09系列充气防压疮垫



DCM-AC05-1V3540



DCM-AC05-1V4040



DCM-AC05-1V4540



DCM-AC06-1V3540



DCM-AC06-1V4040



DCM-AC06-1V4540



DCM-AC07-L2V3540



DCM-AC07-L2V4040



DCM-AC07-L2V4540



DCM-AC07W-2V3540



DCM-AC07W-2V4040



DCM-AC07W-2V4540



DCM-AC09-1V3540



DCM-AC09-1V4040



DCM-AC09-1V4540



DCM-AC09-L2V3540




DCM-AC09-L2V4040




DCM-AC09-L2V4540


3.3 充气操作及修补指导

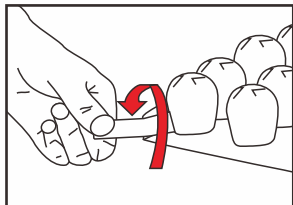


1. 向逆时针方向，旋转打开充气阀。

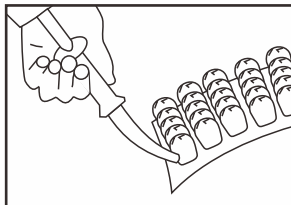


2. 将打气筒尖部出气口塞入气阀进气口，慢慢注气(建议注气量为7~8分饱)。

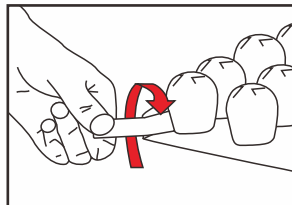

3. 垫体气囊鼓起，完成注气，向顺时针方向锁紧阀门。(建议注气量为7~8分饱)。

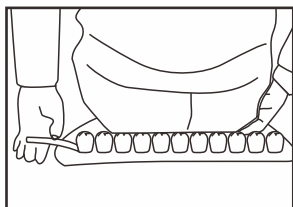

4. 将气垫放置在轮椅上，再将手指置于臀部坐骨与气垫之间，开始“慢慢”放气。

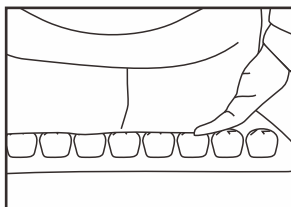

5. 当臀部与气垫之间留有一个“指尖”距离(或根据使用者亲身感受到“最”舒适气量)时，关闭阀门。

注意事项：


1. 有关清洁和清洗，请参照《用户使用手册》。
2. 本气垫使用环保PVC材料制成，请放心使用。
3. 请不要将皮肤直接接触到PVC气垫，可能会引起不良的皮肤过敏反应。
4. 当气垫为双阀门时，请按同样步骤操作。
5. 建议注入气量70~80%为宜。

充气防压疮垫漏气修补指导书

1. 找出漏气位置，并清洁(无水、无灰尘、无污渍)漏气位置。

2. 将胶水点滴在漏气处，并：

- 尽可能让胶水渗入进一定深度的漏气部(孔)；
- 自然晾晒12小时干透、固化为止(视不同季节、温度可调整晾晒时间)。

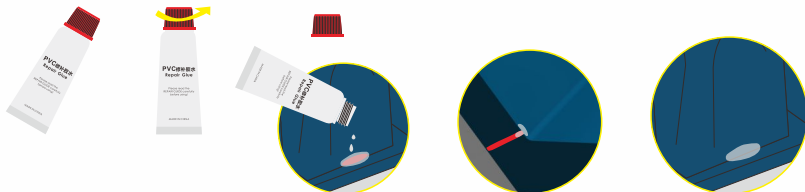

3. 使用注意事项：

- 此胶水仅限于我司充气垫使用。
- 注意：请妥善保管此修复胶水，避免儿童或动物触及到。
- 注意：不小心触及到手指时，请立刻擦拭后用清水冲洗。
- 注意：不小心触及到皮肤或眼睛时，请立刻用清水冲洗，必要时请及时就医。
- 注意：使用后，请拧紧瓶盖，并妥善保管，以备再次使用。

3.4 各型号最大承重参照表

DCM-AC05、AC06、AC07(W)、AC09系列充气防压疮垫各型号最大承重参照表				
最大承重 坐垫型号	DCM-AC05型	DCM-AC06型	DCM-AC07(W)型	DCM-AC09型
DCM-ACXX-1V2525	35.00kg	35.00kg	35.00kg	45.00kg
DCM-ACXX-1V2530	40.00kg	40.00kg	40.00kg	55.00kg
DCM-ACXX-1V3030	45.00kg	45.00kg	50.00kg	65.00kg
DCM-ACXX-1V3035	55.00kg	55.00kg	60.00kg	75.00kg
DCM-ACXX-1V3535	65.00kg	65.00kg	70.00kg	85.00kg
DCM-ACXX-1V3540	75.00kg	75.00kg	80.00kg	95.00kg
DCM-ACXX-1V4040	85.00kg	85.00kg	90.00kg	105.00kg
DCM-ACXX-1V4540	95.00kg	95.00kg	100.00kg	115.00kg
DCM-ACXX-1V4545	105.00kg	105.00kg	110.00kg	125.00kg
DCM-ACXX-1V5045	115.00kg	115.00kg	120.00kg	135.00kg
DCM-ACXX-1V5050	125.00kg	125.00kg	130.00kg	145.00kg

*XX=AC05或AC06或AC07(W)或AC09

3.5 ① ⚠ 使用注意事项：

- 使用前，建议您花10~30分钟时间认真、仔细阅读《用户使用手册》，这将带给您更好的使用效果及保障。
- 作为充气防压疮垫使用，建议您花更多时间解读《用户使用手册》中“**压疮预防知识**”内容，这将助您更好地预防压疮及提升使用效果及保障。
- 充气坐垫出厂前，均已做过漏气检测。使用前，请检查坐垫外包装是否有破损情况。
- 请参照《**各型号最大承重参照表**》选用适用自身体重的坐垫型号及尺寸。
- 第1次充气后，发现漏气时(可能为物流运输途中发生损伤)，请与销售方联系退换。
- 避免外部因素对坐垫的破损，如强力拉扯、尖锐刀具、燃烧中的烟头等。
- 检查衣裤、轮椅或者放置区底部或周围是否有尖锐物等碰到充气垫，造成对坐垫的损伤。
- **使用时，请将坐垫套后侧涤纶固定带打开，并与轮椅两侧立杆固定后使用。**
- 避免宠物猫、狗等的指甲或牙齿对充气坐垫的损伤。
- **请勿使用化学洗涤剂、洗衣粉或研磨粉等清洗、清洁PVC垫体。**
- 清洗垫体时（不可机洗），请使用清水冲洗后，放置在阴凉处自然晾干即可，**切不可直接曝晒于太阳下。**
- 坐垫使用环境温度为-5℃到+50℃。因选用材料的特殊性，请不要在低温环境下长时间使用；在低温环境下，充气坐垫容易变硬、气密性变差、受到外力冲击时，极易造成对垫体的损伤。
- 南北方温差较大——北方、西北、高海拔地区用户在低温季节收到物品时，请勿立即充气；建议在温暖环境中放置，待坐垫软化后再行充气。
- 本产品最佳充气饱和度为70~80%。请不要过量充气，**切不可用高压气体直接充气。**
- 首次使用，建议充完气1小时后使用。
- 气垫在平面硬板轮椅上的使用效果更佳。
- 任何充气制品(包括车胎)都会自然泄气，这是正常现象，注意定期检查并补充气体。
- **使用中，发现有任何不适感，请立即停止使用。必要时，请即刻就医。**
- 为保护环境及资源——当您不再需要坐垫时，请您联系销售商或生产方，我们将协助您将PVC垫体部分及相关部件邮寄回销售商或生产方妥善处理。
- 请妥善保管《产品售后服务信息卡》，并参照“**2.2 有关图标符号说明**”项理解标签卡上信息。

4. DCM-WBC系列轮椅靠背垫

4.1 产品结构及特点：



DCM-WBC系列轮椅靠背垫

4.2 产品尺寸表：

靠背垫型号	适用轮椅尺寸 (以轮椅左右坐宽为准)	靠背垫宽(W) (靠背垫硬铝板尺寸)	靠背垫高(H) (靠背垫缓冲垫尺寸)	靠背垫重量
DCM-WBC-2832	28/32.00cm	26.00cm	29.00cm	1.35kg
DCM-WBC-3438	34/36/38.00cm	27.50cm	29.00cm	1.40kg
DCM-WBC-3843	38/40/42/43.00cm	32.50cm	29.00cm	1.50kg
DCM-WBC-4345	43/45.00cm	36.50cm	29.00cm	1.55kg
DCM-WBC-4850	48/50.00cm	39.00cm	29.00cm	1.60kg

*测量参数与实际尺寸、重量略有出入，均在限值内

4. DCM-WBC系列轮椅靠背垫

4.3 产品安装指南：

① 请核对包装中的物品



A 靠背垫主体



B 8x10mm 开口扳手



C 4mm 内六角扳手



D 2.5mm 内六角扳手

② 取下预装在主体上的快拆支架




向上拉起**红色**锁扣解锁



③ 安装快拆支架至轮椅两侧对应部位

使用4mm 内六角扳
手依次拧紧四处螺栓

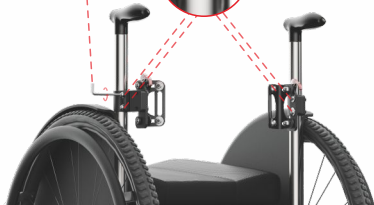

④ 安装孔位可根据实际需求进行上下、左右调整

使用8x10mm 开口扳手



4. DCM-WBC系列轮椅靠背垫


⑤ 将靠背垫对准两侧卡口并锁紧



下压红色
锁扣锁紧



压紧魔术贴

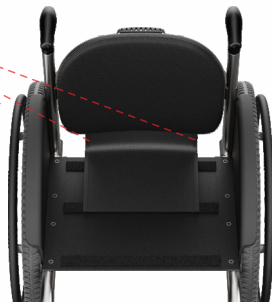

⑥ 将衬布粘在坐垫魔术贴处固定



⑦ 放上靠背垫，安装完成

4.4 ① ⚠ 使用注意事项：


- 拆包检查：核对配件是否齐全，检查外观有无破损，测试卡扣是否顺畅。
- 安装安全检查：确认载体固定牢固，拧紧螺栓，固定卡扣，调节完成后测试整体稳定性。
- 使用安全规范：仅限适配场景使用，调节后确认锁扣锁紧，遇异响或松动应立即停用并检查。
- 清洁维护：使用中性清洁剂擦拭清洁，定期检查各部件状态。

5. DCM-GW系列凝胶轮椅坐垫


5.1 产品说明：




DCM-GW01型

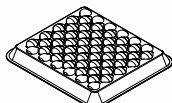


DCM-GW02型

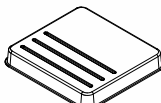

DCM-GW03型

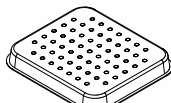

DCM-GW04型

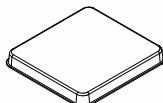



DCM-GW05型

5.2 产品特点及尺寸：

- ☑ 为长期依赖轮椅者贴身制作
- ☑ 久坐“无”压力预防“坐”压疮
- ☑ TPE软凝胶层帮助有效减压

- ☑ 凝胶通过RoHS6项SGS测试
- ☑ 高弹海绵保证坐垫的支撑性
- ☑ 底部PVC具有良好防滑效果

- ☑ 防水面料多层复合工艺生产
- ☑ 多层复合工艺保证经久耐用
- ☑ 防水面料复合工艺更易清洁

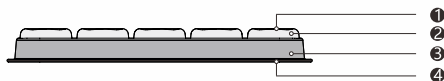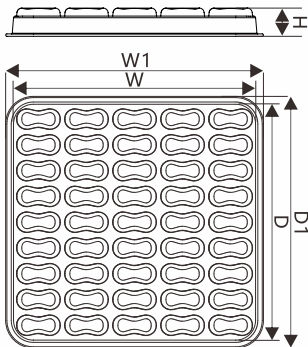

- ① 潜水布(防水、易清洁)
- ② TPE 软凝胶(柔软、不变形、不断裂)
- ③ 高弹海绵(支撑性好、不易变形)
- ④ PVC防滑革(良好的防滑效果)

备注：DCM-GW系列凝胶轮椅坐垫使用材料，生产工艺均相同或相似。其中凝胶部分通过SGS检测，检测报告号：NGBML1402856502(检测结论：基于所送样品进行的测试，镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯(PBBs)、多溴二苯醚(PBDEs)的测试结果符合欧盟RoHS指令(EU)2015/863的限值要求)。

坐垫型号	坐垫参数	坐垫高(H)	坐垫宽(W)	坐垫深(D)	坐垫宽(W1)	坐垫深(D1)	重量
DCM-GW01	花生豆型	4.50cm	40.00cm	39.00cm	42.00cm	41.00cm	1.60kg
DCM-GW02	菱型	6.50cm	44.50cm	39.50cm	46.50cm	41.50cm	1.50kg
DCM-GW03	减压型	5.50cm	43.00cm	40.00cm	45.00cm	42.00cm	1.80kg
DCM-GW04	凹型	5.50cm	43.50cm	38.50cm	45.50cm	40.50cm	1.40kg
DCM-GW05	薄型	4.50cm	43.00cm	40.00cm	45.00cm	42.00cm	1.70kg

*测量参数与实际尺寸、重量略有出入，均在限值内；以上测量参数不包括配送坐垫套尺寸及重量


5.3 ① ⚠ 使用注意事项：

- 避免外部因素对坐垫的破损，如强力拉扯、尖锐刀具、燃烧中的烟头等。
- 需要清洗垫体时，建议使用中性清洁剂后或用清水进行擦拭清洁或上下倒扣方向喷淋清水后，晾干即可。
- 便于使用和清洗，建议您另购我司DCM-GW系列通用防水坐垫套。
- 使用中，发现有任何不适感，请立即停止使用。必要时，请即刻就医。
- 为保护环境及资源——当您不再需要坐垫时，请您联系销售商或生产方，我们将协助您将凝胶垫体部分及相关配件邮寄回销售商或生产方妥善处理。
- "2.2 有关图标符号说明"项同样适用于本产品。

6.1 产品说明：



品名：凝胶坐便垫
型号：DCM-CGP01
尺寸：约45cmx44cmx2cm
重量：约2.00kg
填充：PU凝胶
面层：TPU
固定：松紧带(带扣魔术贴，3条)
最大承重：80.00kg

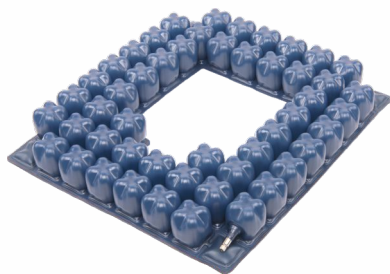


品名：充气坐便垫
型号：DCM-CAC4040或DCM-CAC4045
尺寸：约40cmx40cmx6cm 或
40cmx45cmx6cm
材质：PVC塑胶
固定：松紧带(带扣魔术贴，3条)
最大承重：80.00kg

6.2 ① ⚠ 使用注意事项：

- 使用前，请使用冷水或温水擦拭或喷淋清洁坐便垫表面后使用(出厂前仅做表面基础清洁处理)。
- 用“带扣魔术贴止血(松紧)带”，如“固定示意图”中3处位置，将坐便垫与坐便盖加固后。
- 将坐便垫与坐便盖加固后，请确认加固牢度是否足够。
- **行动不便人士切记!**——一定要用松紧带将坐便垫与坐便盖固定好，并确认牢固之后再使用。
- 在使用过程中，如发现松紧带与马桶盖固定不牢靠时，请及时调整牢固度。必要时，更换固定用松紧带(需要时请与销售方联系!)
- **不建议坐便垫在“洗浴”中使用，此过程会对坐便垫的使用寿命有影响，并直接造成使用安全隐患!如坚持使用，请在每次使用前检查固定是否牢固，防止从坐便垫上滑落，造成人身伤害。**
- 坐便垫最高使用温度为40摄氏度，最大承重重量为80.00公斤。
- 使用中，发现有任何不适感，请立即停止使用。必要时，请即刻就医。
- 避免外部因素对坐垫的破损，如强力拉扯、尖锐刀具、燃烧中的烟头等。
- 为保护环境及资源——当您不再需要坐垫时，请您联系销售商或生产方，我们将协助您将凝胶垫体部分邮寄回销售商或生产方妥善处理。

7. DCM-PS26辅助取物杆

7.1 产品说明：

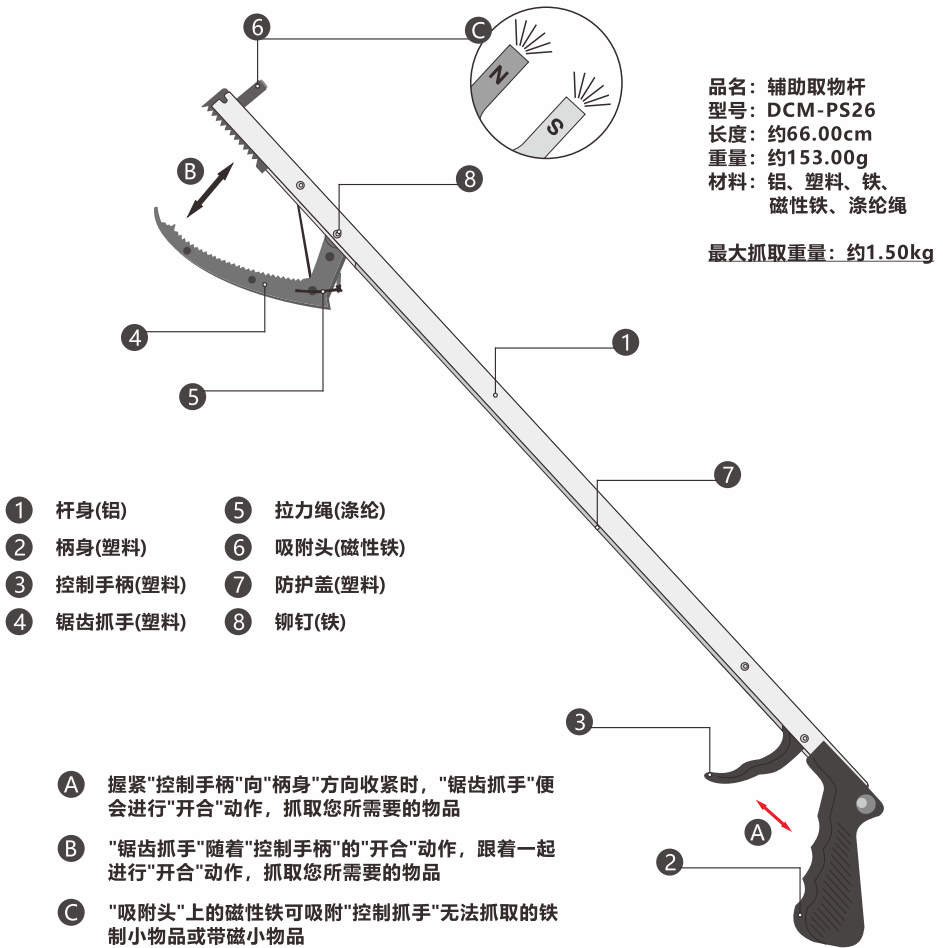

7.2 ⓐ 使用注意事项：

- 辅助取物杆最大抓取重量为1.50公斤。
- 请将辅助取物杆放置在远离儿童处，以免儿童误碰发生意外伤害。
- 请将辅助取物杆放置在远离宠物狗或猫的地方，以免宠物将拉力绳咬损或咬断。
- 请妥善保管好辅助取物杆，避免重物或者重力使辅助取物杆发生弯曲或变形。
- 请勿将辅助取物杆当作“拐杖”使用，以免造成辅助取物杆发生弯曲或变形后无法正常使用。
- 请勿使用辅助取物杆驱赶或者伤害小动物。
- 为保护环境及资源——当您不再需要辅助取物杆时，请您联系销售商或生产方，协助您将辅助取物杆邮寄回销售商或生产方妥善处理。

(一)、什么是压疮

压疮又称压力性溃疡、褥疮，是由于局部皮肤组织长期受压力、摩擦力和/或剪切力、温湿度的季节性变化；发生持续性缺血、缺氧、营养不良而致皮肤抵抗力下降，使皮肤组织颜色改变，出现水疱、溃烂甚至坏死。压疮在康复治疗、护理中是一个普遍性的问题。

(二)、压疮诱因

1. **压力因素**：垂直压力引起压疮最主要的原因是局部组织遭受持续性垂直压力，特别在身体骨头粗隆凸出处。如果长期卧床或坐轮椅、夹板内衬垫放置不当、石膏内不平整或有渣屑、局部长时间承受超过正常毛细血管的压迫，均可造成压疮（一般而言皮肤层下的血管可承受的压力约为32mmHg左右，假若超过以上的压力，局部血管便可能扭曲、变形而影响到血流的通过，则有缺血的现象）。
2. **摩擦力**：摩擦力作用于皮肤，易损害皮肤的角质层。当患者在床上活动或坐轮椅时，皮肤可受到床单和轮椅垫表面的逆行阻力摩擦，如皮肤被擦伤后受到汗、尿、大便等的浸渍时，易发生压疮。
3. **剪切力**：剪切力是一个作用力施于物体上后导致产生一平行反方向的平面滑动，是由摩擦力与垂直压力相加而成。它与体位关系密切，例如平卧抬高床头时身体下滑，皮肤与床铺出现平行的摩擦力，加上皮肤垂直方向的重力，从而导致剪切力的产生，引起局部皮肤血液循环障碍而发生压疮。
4. **温湿度与季节因素**：身体受到压力、摩擦力、剪切力的部位随着“受力”程度的大小；“受力”时间的加长，相应的温度、湿度值也会升高，随着“受力”部位及周边肌肉的温湿度值升高，极易引发压疮的风险。
5. **营养状况**：全身营养缺乏，肌肉萎缩，受压处缺乏保护，如长期发热及恶病质等。全身营养障碍，营养摄入不足，出现蛋白质合成减少、负氮平衡、皮下脂肪减少、肌肉萎缩，一旦受压，骨隆突处皮肤要承受外界压力和骨隆突处对皮肤的挤压力，受压处缺乏肌肉和脂肪组织的保护，引起血液循环障碍出现压疮。
6. **皮肤抵抗力降低**：皮肤经常受潮湿、摩擦等物理性刺激（如石膏绷带和夹板使用不当、大小便失禁、床单皱褶不平、床上有碎屑等），使皮肤抵抗力降低。

(三)、怎样预防压疮

避免局部组织长期受力，处于高温、高湿状态，局部受刺激；促进血液循环，改善营养状况；使用功效好的防压疮坐垫、床垫等，具体如下：控制压疮发生的关键是预防，措施落实即可避免压疮的发生，减少患者的痛苦，提高疗效、减轻家属的负担。因此要求做到六勤，即**勤翻身、勤擦洗、勤按摩、勤整理、勤更换、勤观察**。

1. 经常更换体位使骨骼突出部位交替地减轻压迫、通风散热。应鼓励和协助长期卧床的患者常翻身，每2 - 3小时翻身一次，最长时间不超过4小时，必要时每小时翻身一次，建立床头翻身记录卡。翻身时尽量将患者身体抬起，避免拖、拉、推以防擦伤皮肤。
2. 保护骨隆突处和支持身体空隙。可以在压疮的易发部位比如肩背部、骶尾部、髌部、内外踝部、足跟部、耳廓以及枕部等处表面喷褥疮消，褥疮消能直接深入病灶，发挥药效，消炎化脓、祛腐生肌、收敛止痛、润肤生肌，促进皮肤组织恢复功能，刺激神经因子再生长。
3. 使用石膏、夹板或其他矫形器械者，衬垫应松紧适度（松则易移动，起不到固定作用。紧则影响血液循环）尤其要注意骨骼突起部位垫，应仔细观察局部和肢端皮肤的变化情况，重视患者的主诉，给予及时调整。

4. 保持床铺清洁、平整、无皱折、干燥、无碎屑。
5. 有大小便失禁、呕吐、出汗者，应及时擦洗干净，衣服、被单随湿随换；伤口若有分泌物，要及时更换敷料，不可让患者直接卧于橡皮单上。
6. 使用便器时，应选择无破损便器，抬起患者腰骶部，不要强塞硬拉。必要时，肠蠕动弱、肌肉萎缩、便秘人士在坐便器边缘垫上专用减压坐便垫，以防擦伤皮肤、减少压力、减轻"坐便"痛苦。
7. 经常进行温水擦浴，局部按摩，定时用褥疮消喷剂喷到受压处，达到通经活络，促进血液循环，改善局部营养状况，增强皮肤抵抗力的作用。
8. 长期卧床或病重者，应注意全身营养，根据病情给予高蛋白、高维生素膳食，增强抵抗力及组织修复能力。
9. 不时煎服一些去毒疮性中药服用，可帮助预防褥疮。
10. 常年处于高温、高湿地带的人士需要特别注意减轻身体受到压力、摩擦力、剪切力的同时，也要尽可能保证"受力"部位肌肉的通风、散热处于良好状态。
11. 生活在寒、温带地区的人士，在春夏交替，气温回升时期，对"前述"内容需要特别引起注意和预防。
12. 使用减压能力强，透气效果好的坐垫或床垫预防压疮生成，做好日常"六勤"护理工作。



敬告：以上内容，仅供参考！如需获得专业、权威性"压疮预防知识"时，请咨询并遵从专业医师！



执行 使用前，请仔细、认真地阅读完此手册。



执行 请妥善保管好此手册，直到不再使用并另行处理或一并退回所购产品为止。



敬告 鉴于用户手册篇幅的局限性，实物与用户手册上内容可能不一致，请以实物及产品标识内容为准。



达盛医疗,
力量源于勇气, 达于行动...

感谢您选用我司产品及服务!

由 宁波达盛医疗器械有限公司 监制销售
浙江省宁波市宁海县跃龙街道檀香南路12幢1号

Ningbo Dacheng Medical Instrument Co., Ltd.
www.dachengmed.com

VER.DCM.UM.CN2026.04

